





Splintwijzer

Splint	WhiteSplint®	ClearSplint®
		
Draagcomfort	✓ ✓ ✓	✓
Retentie en pasvorm	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Voorspelbaarder resultaat indien de beet digitaal wordt verhoogd	✓ ✓	✓
Minimale beetverhoging mogelijk	✓ ✓ ✓	✓
Parodontaal vriendelijk	✓ ✓	✓
Slijtvast	✓ ✓ ✓	✓ ✓
Breukvast	✓ ✓ ✓	✓ ✓
Biocompatibel	✓ ✓ ✓	✓ ✓
Reinigbaarheid	✓ ✓	✓ ✓
Modelloos leverbaar	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Front en hoektand geleiding	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Transparant		✓ ✓
Flexibiliteit	✓ ✓	✓ ✓

Wilt u meer weten over splints?

Neem dan contact op met uw lokale Excent contactpersoon.

WhiteSplint®

ClearSplint®



Splint Reinigingsprotocol

Dagelijks onderhoud van uw splint:

1. Vul uw wasbak met water.
2. Spoel uw splint goed schoon met lauwwarm water onder de 45 graden Celsius.
3. Borstel uw splint, niet te hard, met een zachte borstel en niet-schurende zachte zeep.
4. Borstel uw tandvlees, tong en tanden met tandpasta.
5. Bewaar uw splint, bij niet gebruik, droog.

Een splint verkleurt altijd iets in de loop van de tijd door de manier van reinigen van de mond en de splint. Ook medicijngebruik en voedsel kunnen hier invloed op hebben. Verkleuringen kunnen enigszins verminderd worden door de splint eens per maand tussen de 3 en 5 minuten in water te leggen met een opgelost prothesereinigingstablet. Langere tijd zal de reinigbaarheid van de splint nadelig beïnvloeden.

WhiteSplint[®]

ClearSplint[®]